


Contact Monthly Multifocal

Lente morbida multifocale mensile (55%).

Contact Monthly rappresenta la gamma di lenti a contatto mensili ZEISS più ampia e completa. Lenti sferiche, toriche e multifocali. Lenti a geometria asferica con potere costante in qualsiasi punto della zona ottica garantiscono una visione stabile e immediata.

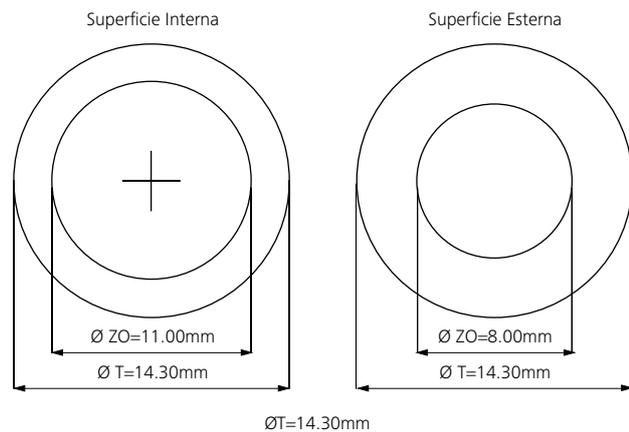

Contact Monthly Multifocal

Geometria	Multifocale
Materiale	filcon IV
Dk/t (-3,00)	24
H ₂ O	55%
Pack	3 pezzi
Raggio base	8,6
Diametro	14,3
Colorazione	Sì
Poteri sferici	0,00/-6,00 int 0,25 -6,50/-10,00 int 0,50 +0,25/+4,00 int 0,25 +4,50/+10,00 int 0,50
Addizioni	Low (da +1,00 a 1,75) High (da +2,00 a +3,00)

Caratteristiche

Lente a geometria multifocale

Visione simultanea CD CN in relazione all'occhio dominante

Due addizioni:

Low (fino a + 1,75)

High (fino a + 3,00)

Codice: RM30P

Classe: 303

Contact Monthly Multifocal

Lente morbida multifocale mensile (55%).

CONSIGLI APPLICATIVI

PER MIOPIE E BASSE IPERMETROPIE	
Occhio dominante	Occhio non dominante
	
CD: Centre Distance	CN: Centre Near

- L'occhio dominante viene applicato con le lenti **"CD"** (Lontano al centro, intermedio e periferia il vicino)
- L'occhio non dominante viene applicato con le lenti **"CN"** (Vicino al centro, intermedio e periferia il lontano)

PER IPERMETROPIE $>+0,75D$	
Occhio dominante	Occhio non dominante
	
Geometria CN per entrambi gli occhi	

Lenti **"CN"** in entrambi gli occhi (Vicino al centro, intermedio e periferia il lontano)

ATTENZIONE: per ordini tramite il portale indicare o selezionare le addizioni secondo il seguente schema.

Selezionare 1,25 per CN addizione LOW

Selezionare 1,50 per CD addizione LOW

Selezionare 2,25 per CN addizione HIGH

Selezionare 2,50 per CD addizione HIGH